

Сухожаровой шкаф КН-360В

Сухожаровой шкаф (сухожар) для стерилизации КН-360В с LCD дисплеем. Применяется для стерилизации маникюрных, парикмахерских, косметологических и медицинских инструментов. Сухожар подвергает инструменты термической обработке, что не приводит инструменты к коррозии. Внутри находится съемный контейнер из нержавеющей стали, который используется для хранения и стерилизации инструментария. Сухожар рассчитан на стерилизацию трех комплектов маникюрных инструментов.

Характеристики:

- *Мощность: 500 Ватт*
- *Объем камеры: 1,8 литров*
- *Размер камеры: 250 x 120 x 60 мм*
- *Размер стерилизатора: 310 x 140 x 180 мм*
- *Таймер работы: от 0 до 90 минут*
- *Терморегулятор: от 0 до 250 °C*

Инструкция:

1. Нажмите кнопку "Menu" для начала выставления таймера. Каждое нажатие кнопки "Timer Setting" добавляет 5 минут к таймеру, чтобы уменьшить время нажмите "Reduce temperature/Time". Максимальное время стерилизации - 90 минут.

2. Для установки температуры нажмите кнопку "Temperature Control", по умолчанию экран начнет мигать на цифре 075. Для регулировки температуры нажмите "Timer Setting", каждое нажатие добавит 5 градусов, чтобы уменьшить температуру нажмите "Reduce temperature/Time". Максимальная температура - 250 градусов. Установите нужную Вам температуру. После того как экран замигает 5 раз, сухожар включится.

3. После успешного запуска, сухожар будет показывать текущую температуру.

4. Чтобы сбросить настройки таймера и температуры и отключить нагрев, нажмите "Reset Key".